

AEDの点検をしていますか？



このマークはAEDの設置場所を示すマークです。

緊急時に、AED(自動体外式除細動器)を正常に使用するために、日頃からAEDの点検をお願いします。

いざという時のために、AEDの設置者は、以下の点に注意して日常点検を実施してください。

1 インジケータの確認

AED本体のインジケータのランプの色や表示により、AEDが正常に使用可能な状態を示していることを日常的に確認してください。

2 電極パッドやバッテリーの交換

製造販売業者等から交付される表示ラベルに電極パッド及びバッテリーの交換時期を記載し、記載内容を容易に確認できるようにAED本体又は収納ケースに表示ラベルを取り付け、この記載を基に電極パッドやバッテリーの交換時期を把握し、交換を適切に実施して下さい。

点検の異常及び消耗品の交換に関しては、AEDの購入店や各メーカーにお問い合わせください。

製造販売業者	問い合わせ先	ホームページ
株式会社CU	AEDコールセンター 0120-910-256	http://www.japan-cu.com/
日本光電工業株式会社	AED保守受付センター 0120-233-821	http://www.nihonkohden.co.jp/aed/
日本メドトロニック株式会社	ライフパックお客様センター 0120-715-545	http://www.medtronic-lifepak.com/
株式会社フィリップス エレクトロニクスジャパン	AEDコールセンター 0120-802-337	http://www.philips.co.jp/
オムロンヘルスケア株式会社	AEDカスタマーサポートセンター 0120-401-066	http://www.aed.omron.co.jp/

問い合わせ先
長野市消防局 警防課救急担当
電話 026-227-8002